

안전손잡이

Ageing in place
내 집에서 추억 쌓기

Safety Grab Bars

사용설명서

ASH-301, ASH-302
ASH-303, ASH-304




- 품명 : 부착식안전손잡이
- 모델명 : ASH-301, 302, 303, 304
- 제조년월일 : 제품박스에 별도표기
- 제조자명 : (주)에이엠이 • 제조국명 : 한국
- A/S 전화번호 : 031-677-7522
- 사용장소 : 1) 실내용
2) 사용 장소 제한 없음

- 단체표준번호 : KSPA5001
- 인증번호 : ASH-301제851호(20220104-1)
ASH-302제852호(20220104-2)
ASH-303제853호(20220104-3)
ASH-304제854호(20220104-4)

[품질보증] 본 제품은 단체표준인증 단체인 당 협회에서 품질을 보증함

한국고령친화용품산업협회

안전동작하중
80kg 이하

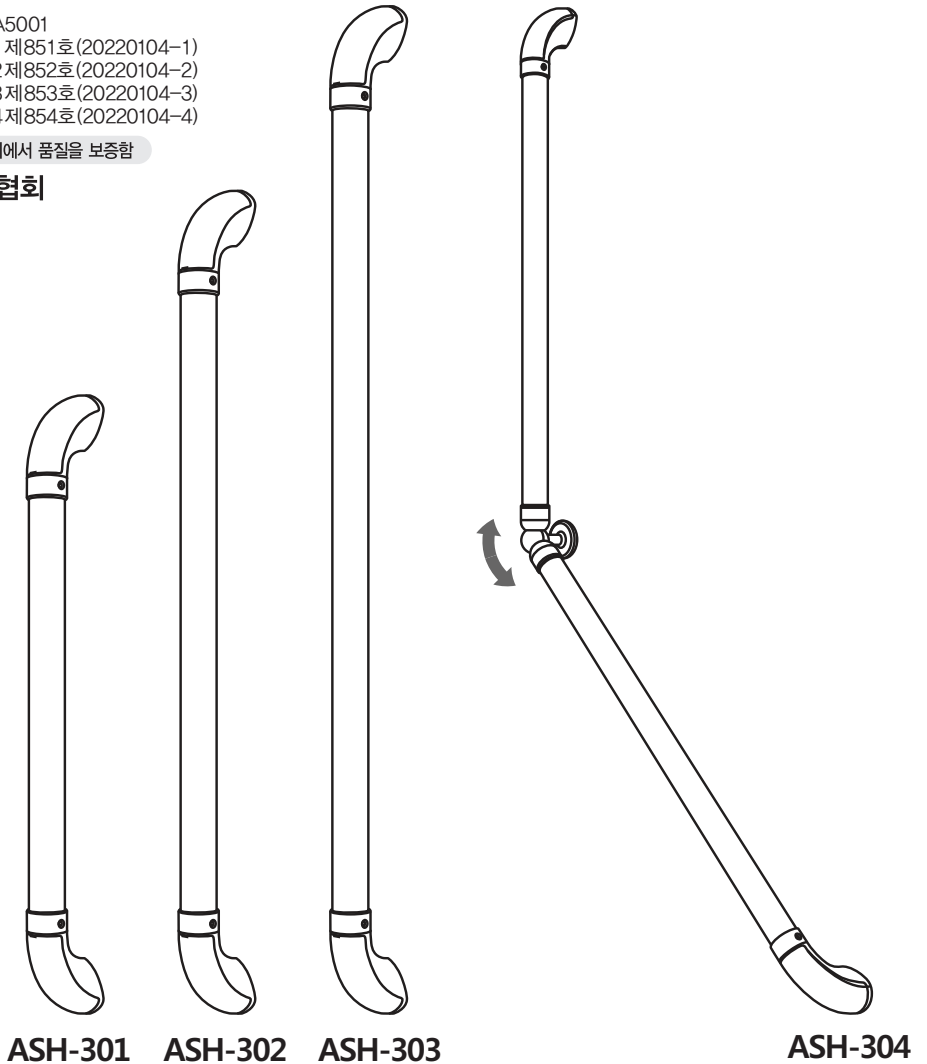

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고, 다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

- 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 구입일, 판매점 등을 기입하고 확인 해 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

*그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



경고

표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



주의

표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우

경고



사용목적 외 사용금지

안전손잡이 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.



안전손잡이에 물 등 수분이 닿게 하지 마십시오.

미끄러짐으로 인하여 낙상이 발생되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



안전손잡이를 심하게 밀거나 당기는 등 과격한 충격을 가하거나 무리하게 체중을 가하지 마십시오.

안전손잡이가 이탈되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.

제품기능이 정상적으로 작동되지 않아 심각한 상해를 입을 수 있습니다



전열기 등 화기류를 가까이 하지 마십시오.

제품손상 및 왜곡으로 사용 중 상해를 입을 수 있습니다.



사용자의 손이 젖어있거나 미끄러운 상태에서 사용하지 마십시오.

손잡이를 놓치거나 미끄러짐 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



일상점검을 하십시오.

불안정한 상태에서 사용 시 안전손잡이가 이탈되어 상해를 입을 수 있습니다.



안전손잡이 설치 시 부착강도가 확보되는 부착부위인지를 확인하고 설치하십시오.

불안정한 벽면에 설치 시 이탈, 사용자의 낙상 등으로 상해를 입을 수 있습니다.

경고



안전손잡이에 매달리거나 기대는 등 지지목적으로 사용하지 마십시오.

전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



제품세척 및 소독을 위하여 염소계 및 신나, 크레졸 등과 산, 알칼리계 세제 등을 사용하지 마십시오.

제품열화, 변형 및 파손의 원인이 되고 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.




제품 세척 시 중성세제를 사용하십시오.

청결 및 제품보호, 미끄럼방지 등을 위하여 중성세제를 사용하여 세척 하십시오.

제품의 특징 및 사용환경

- 당사의 안전손잡이는 거동이 불편하신 분이 생활공간에서 일상생활의 필요한 동작을 행할 때 보다 용이하도록 동작을 지원함으로써 활동량을 증대하고 활력증진에 기여하여 자립지원을 목적으로 하며, 낙상 등에 의한 사고예방을 목적으로 합니다.
- 욕실, 화장실 등 수분이 많은 환경에서도 사용이 가능하며 계절에 따른 온도차에 영향이 적어 대부분의 생활환경에서 문제 없이 사용가능합니다.

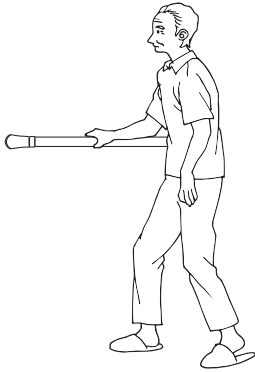

일상생활 중 이동할 때



현관앞에서 신발을 신고벗을 때



화장실에서 앉고 일어설 때
(ASH-304 제품 권장)



문을 열고 닫을 때





계단을 오르고 내릴 때
(ASH-304 제품 권장)




목욕 전/후 일어설 때
(ASH-304 제품 권장)

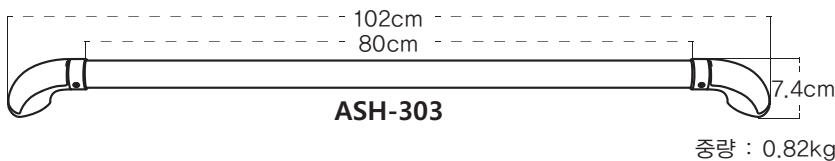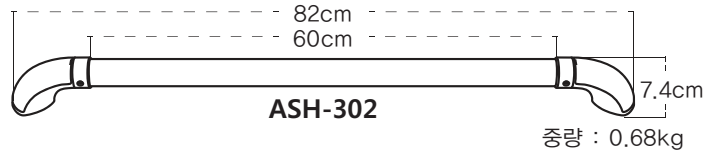


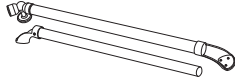



각부의 명칭 및 제품규격

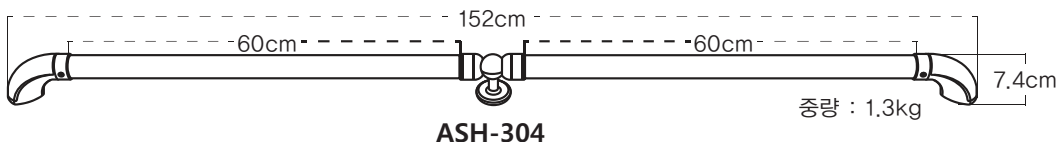

재질 (공통) : 알루미늄, PVC



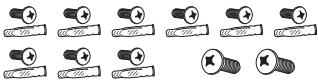


제품 구성

제품명	부품명	이미지	수량
ASH-301 ASH-302 ASH-303	본체		1
	마감브라켓 커버		2
	일반형 안전손잡이 조립세트 (고정볼트 6개, 칼브럭 6개)		1set
ASH-304	본체		1
	마감브라켓 커버		2
	스윙브라켓 커버		1
	일반형 안전손잡이 조립세트 (고정볼트 9개, 칼브럭 9개, 회전연결볼트 2개)		1set

설치 전 준비사항

■ 부착할 위치 상태 확인

-  벽 속에 전선 또는 수도파이프가 지나가는지 벽스캐너 또는 배관도면을 확인하십시오.
설치 시 전선 또는 수도파이프의 배관을 파손할 우려가 있습니다.
-  화장실에서 설치하는 경우 타일의 파손을 주의해 주십시오.
설치 시 드릴의 헤머기능 보다 스crew 기능을 사용하여 타공점을 탭핑해 주시기 바랍니다.
-  설치 벽면이 석고보드, 토벽, 빈 공간 등 고정력이 약한 상태일때에는 설치하지 마십시오.
만약 고객이 석고보드, 토벽, 빈 공간 등에 설치를 요구할 경우, 전문가와 부착면의 상태를 확인 후 설치하시기를 권장 드립니다.

안전손잡이 설치 ‘적합성 점검 포인트’

1. 사용자 본인의 희망이나 요구에 적합한가?
가족이나 요양보호사 또는 전문가의 주장에 앞서 사용자 본인의 요구사항이 우선 고려되어야 합니다.
사용자 본인이 사용하지 않는다면 제품의 사용성이 떨어지기 때문입니다.
2. 질병이나 장애 등 신체 상태에 적합한가?
사용자의 장애나 신체상태, 잔존기능 등에 따라 안전손잡이의 종류, 설치위치 등이 달라질 수 있습니다.
경우에 따라서는 안전손잡이의 사용이 부적절할 수 있습니다..

3. 사용자의 신체치수에 적합한가?

불특정 다수의 사람이 사용하는 공용 안전손잡이가 아니라 특정 공간에서 주문자 전용으로 사용하는 안전손잡이로 사용자의 신체높이를 고려하여 설치되어야 합니다. 즉, 사용자 개개인의 신체치수와 자세 등에 차이가 있으므로 일률적인 치수나 기준을 적용할 것이 아니라 사용자 중심의 기준이나 평가가 요구됩니다.

4. 동작패턴이나 생활동선에 적합한가?

사람들은 각기 나름의 특징적인 동작패턴이나 생활동선을 가지고 있습니다. 안전손잡이를 설치할 때에는 이를 고려하여 설치위치를 지정하여야 합니다.

5. 동작을 방해하지 않는가?

안전손잡이를 설치하는 위치가 잘못 선정되면 사용자의 동작을 끊게 되거나 부자연스럽게 할 수 있습니다. 손잡이의 위치가 사용자의 동작을 방해하지 않는지 확인해야 할 필요가 있습니다.

6. 안전한 부착강도를 확보할 수 있는가?

설치해야 할 벽의 상태가 요구하는 부착강도를 확보할 수 있는지 확인해야 합니다. 벽 속에 빈 공간이라면 허공을 잡고 매달리는 것과 같습니다.

7. 가족이나 보호자는 동의하는가?


고령자 등의 사용자가 안전손잡이의 물리적, 역학적 기능을 사용하는 사용자라면 그 가족이나 요양보호사 등의 보호자는 안전손잡이의 사회적 기능을 사용하는 사용자라 할 수 있습니다. 그들의 동의를 구하지 못했다면 설치자는 다시 재설치를 하기 위해 가야 하거나, 향후에 벌어질 만약의 사고에 매우 불리한 상황에 처할 수 있습니다.

설치방법




① 설치할 손잡이의 종류와 위치를 결정한다.

*사용자의 신체상황이나 생활동선 등을 고려하여 설치할 안전손잡이의 종류와 위치를 결정('적합성 점검 포인트' 참고)

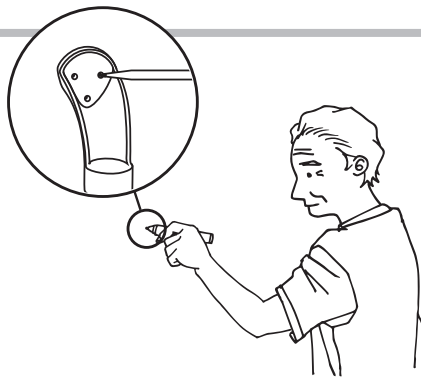


② 브라켓을 고정할 위치에 마카 표시한다.

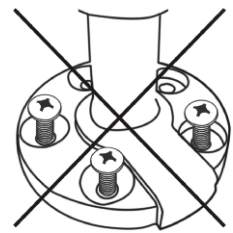

* (주의사항) ASH-304 설치시


스윙브라켓은 3개의 고정 부위를 반드시 설치하며, 또한 3개를 연속하여 작업하지 않는다. 최소한 고정부위 1칸은 건너 뛴 상태로 설치를 해야 한다.

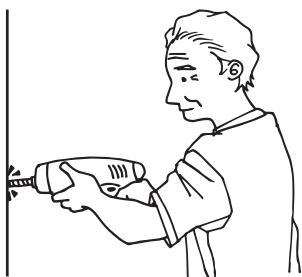

③ 마카 표시된 위치에 공구를 사용하여 드릴링 작업을 실시한다.



④ 드릴링 작업된 구멍에 칼브력을 삽입하고, 나사로 고정한다.

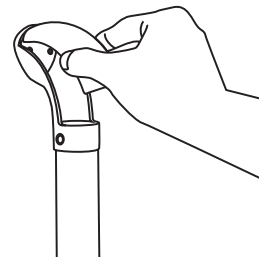

⑤ 브라켓 커버를 체결한다.

*벽면쪽으로 브라켓 커버 연결 부위를 먼저 결합 후 지긋이 눌러 체결한다.

⑥ 사용자 및 보호자에게 주의사항과 사용방법을 설명한다.



주의

설치 시 전문 시공자에게 부착면 상태 및 위치 등을 문의 후 설치를 권장드립니다.

교환, 반품 및 A/S

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 환불	해당 없음
구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 무상수리	해당 없음
수리 가능	동일 하자로 2회째 고장 발생 시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	교환 또는 환불	유료수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	교환 또는 환불	유료수리
수리 불가	부품 보유기간 이내에 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품이 없어서 수리 불가능 시	교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불
소비자 과실	수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	해당 없음
천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우		유료수리	유료수리
사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우			

제품보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____
 구입일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일
 고객명 : _____ 전화번호 : _____
 판매점 : _____ 전화번호 : _____

- 수리 의뢰시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증기간을 기산합니다.
- 당사 부품 보유기간은 6년입니다.

ame

(주)에이엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600
 고객상담실 031-677-7522